



Diveen[®] macht das Leben leichter

STRESS-/BELASTUNGSINKONTINENZ


STRESS MIT IHRER BLASE?

Millionen von Frauen sind weltweit betroffen.

Ist es Ihnen unangenehm, in lustigen Momenten laut los zu lachen, draußen Sport zu treiben oder mit Ihren (Enkel-) Kindern wild zu toben? Haben Sie keine Zeit für die ständige Suche nach einer Toilette? Blasenschwäche kann belastend

sein und Sie in Ihren täglichen Aktivitäten beeinträchtigen.

Lassen Sie sich nicht davon abhalten, das zu tun, was Sie glücklich macht.

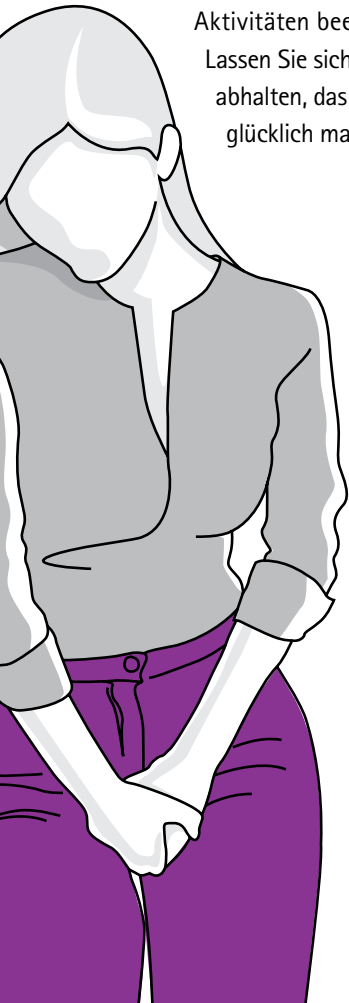

BELASTUNGSINKONTINENZ

Belastungsinkontinenz ist mit mehr als 30% eine der häufigsten Inkontinenzformen bei Frauen. Frauen jeden Alters können betroffen sein: ob jung oder alt.

Hauptursachen sind oftmals Schwangerschaft und die Geburt des Kindes. Weitere Gründe für eine Blasenschwäche können auch Menopause, Übergewicht und allgemeiner Muskelschwund im Alter sein.

SYMPTOME UND SCHWEREGRADE

Das Problem bei Belastungsinkontinenz ist die geschwächte Beckenbodenmuskulatur, die den Blasenaustritt nicht ausreichend stützen kann. Es kommt zu ungewolltem Urinverlust, der in drei Schweregrade gegliedert wird:

1. Grad

Harnverlust bei starker Druckerhöhung im Bauchraum z. B. Husten, Niesen, Lachen

2. Grad

Harnverlust bei mäßiger Druckerhöhung im Bauchraum z. B. Heben, Treppensteigen, Aufstehen

3. Grad

Harnverlust bei geringer Druckerhöhung im Bauchraum z. B. beim Liegen im Bett

Diveen®

Macht Ihr Leben leichter

Diveen® zur effektiven Behandlung Ihrer Belastungsinkontinenz.

Das Hilfsmittel wird intravaginal eingeführt und unterstützt den Verschluss der Harnröhre.

- Zwölf Stunden* Kontinenzkontrolle auch bei körperlicher Aktivität
- 100 % diskreter Schutz, den keiner sieht und riecht
- Gut verträgliches Material (latex- und DEHP-frei)
- Einfache und sichere Verwendung wie ein Tampon
- Diveen® kann mit oder ohne Applikator eingeführt werden
- Wirkt sofort ohne chirurgischen Eingriff und ist vollständig unsichtbar
- Innovativ mit klinisch nachgewiesener Wirksamkeit

*Diveen® sollte nicht länger als zwölf Stunden am Stück im Körper verbleiben - nach Reinigung kann es einmalig wiederverwendet werden

„Ich habe bislang Slip-Einlagen verwendet, was ich als sehr unangenehm empfunden habe, vor allem wenn die Einlage nass wurde. Nachdem ich Diveen® getestet habe, stand für mich fest, nie wieder Slip-Einlagen zu tragen, denn ich bin jetzt wieder dicht.“

Frau, 56 Jahre

„Ich habe nach der Geburt bemerkt, dass ich plötzlich beim Laufen ab und an Urin verliere. Ich habe bislang auf lange Läufe verzichtet. Die sind jetzt wieder möglich - mehr Freiheit bei sportlichen Aktivitäten.“

Frau, 32 Jahre



DIE LÖSUNG

Diveen® – so einfach*

Bevor Sie das Produkt verwenden waschen Sie bitte Ihre Hände und nehmen Sie eine bequeme Haltung ein.




Setzen Sie den Schieber wieder zurück in das Applikatorröhrchen. Diveen® kann jetzt eingeführt werden.



Entfernen Sie den Schieber aus dem Applikatorröhrchen.



Führen Sie das Applikatorröhrchen in die Scheide ein. Nutzen Sie den Schieber, um das Produkt in die Scheide zu schieben (wie bei einem Tamponapplikator).

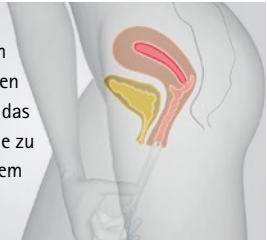

Drücken Sie sanft auf den Ring des Produkts.



Entfernen Sie den Applikator.



Führen Sie ihn in das Applikatorröhrchen ein.




ENTFERNUNG
Ziehen Sie sanft am Rückholfaden.



* Bitte lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisung. Fragen Sie Ihren Arzt zum Umgang mit Ihrer Inkontinenz. Weitere Informationen und FAQs zu Diveen finden Sie auf unserer Homepage www.bbraun.de/diveen

Testen Sie Diveen® selbst

Diveen® kann von Ihrem Arzt auf Einzelrezept verordnet werden und wird von Ihrer Krankenkasse erstattet. Sprechen Sie Ihren Arzt darauf an.

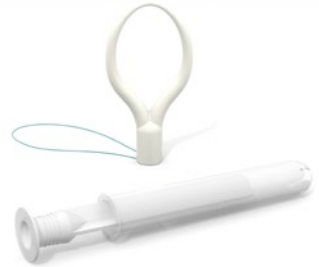

BESTELLINFORMATION

GRÖSSE	STÜCK/BOX	ART.-NR.	PZN	HIMI-NR.
Small	5 Stück + 1 Applikator	3132DE	15198634	15.25.21.2005
Medium	5 Stück + 1 Applikator	3133DE	15198657	15.25.21.2005
Small	15 Stück + 1 Applikator	3022DE	15198640	15.25.21.2005
Medium	15 Stück + 1 Applikator	3023DE	15198663	15.25.21.2005

	AOK	LKK	BKK	IKK	VdAK	AEV	Knappschaft	UV*	BVG	Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer
Gebühr frei	Krankenkasse								6	X	8	9		
Noctu	Karin Mustermann Musterstr. 20 12666 Münsterstadt								Zusammen		Gesamt-Brutto			
Sonstige	Kassen-Nr. 333333 Vertragsarzt-Nr. 555555								Arzt-Nr. 1111		VK gültig bis		Datum 01.01.19	
Unfall									Arzt-Nr.		Arzt-Nr.		Faktor	
Arbeits- unfall									Datum		Datum		Taxe	
									0 6 0 6 0 9					
	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)								Vertragsarztstempel					
aut idem	Diveen® medium, Vaginaltampon, 1 x 15 Stück REF 3023DE, PZN 15198663, Himi 15.25.21.2005													
aut idem	Diagnose: Belastungsinkontinenz, ICD ...													
aut idem	Versorgungszeitraum von ... bis ...													
									Arztstempel					
									Unterschrift des Arztes Muster 16 (4.1995)					

*) s. Rückseite

BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET:

www.bbraun.de/kontinenz-patienten

Unter dieser Adresse vermitteln wir Ihnen umfangreiches Fachwissen, geben Ihnen hilfreiche Tipps zum Leben mit Inkontinenz, beantworten Ihre individuellen Fragen u.v.m.

Alles rund um das Thema Diveen finden Sie unter:

www.bbraun.de/diveen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00

E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de

Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen